



SICHERHEIT
AM ARBEITSPLATZ

Augenspülung zum schnellen Entfernen von Fremdkörpern

Plum Augenspülung lindert Beschwerden
und beugt Folgeschäden durch Fremdkörper
im Auge vor.

PRODUKTFAKTEN & VORTEILE

- Entfernt effektiv Staub, Schmutz und Verunreinigungen aus den Augen
- Einfach zu handhaben - entweder von der verletzten Person selbst oder mit Hilfe
- Flexible Lösungen – Flaschen für den mobilen Einsatz und Stationen für die Wandmontage
- Breites Anwendungsspektrum - von Industriearbeitsplätzen bis hin zu Labors und Erste-Hilfe-Sets
- Hohe Funktionssicherheit - Flaschen entsprechen EN 15154-4
- CE-Kennzeichnung gemäß den Richtlinien zur Klassifizierung der MDD 93/42/EWG
- Haltbarkeit von 3,5 Jahren bei versiegelten Flaschen



Die Produkte sind gemäß Leitfaden zur Klassifizierung der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) mit der CE-Kennzeichnung versehen.

KONTAKT

info@plum-deutschland.de
+49 4721 681801

Kombinieren Sie Plum Eyewash mit Plum pH Neutral an Arbeitsplätzen wo ein Unfallrisiko mit Chemikalien besteht

Informieren Sie sich über Ihre Chemikalien und sorgen Sie für die passende Erste Hilfe.

Welche Augenspülung erforderlich ist, liegt an der Unfallursache. Zuerst muss festgestellt werden, ob ein Fremdkörper oder eine Säure aus dem Auge entfernt werden muss - und wenn möglich, welchen pH-Wert die jeweilige Lösung hat.

Wenn der pH-Wert entweder stark sauer oder alkalisch ist, spülen Sie zuerst mit Plum pH Neutral, bis die Flasche leer ist. Entsorgen Sie die Flasche und spülen Sie mit der Plum Eyewash weiter, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.

Ist der pH-Wert neutral, spülen Sie mit Plum Eyewash, bis die Flasche leer ist. Entsorgen Sie diese anschließend.



4921 - Plum iBox 2 mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspülung

ERGONOMISCHER AUGENAUFSATZ

Die Form der Augenaufsätze helfen dabei, die richtige Flüssigkeitsmenge und Spülzeit sicherzustellen. Drücken Sie die Flasche leicht zusammen, um einen weichen und angenehmen Strahl zu erzeugen.

MONO AUGENAUFSATZ



Flexibler, ergonomischer Augenaufsatz, der das Augenlid während des Gebrauchs offen hält

DUO AUGENAUFSATZ



Flexibler, ergonomischer Augenaufsatz, der das gleichzeitige Spülen beider Augen ermöglicht

VERFÜGBARE GRÖSSEN

Art.-Nr.	MONO AUGENAUFSATZ	4691	4604	4707	DUO AUGENAUFSATZ	4861	4800
Inhalt		200 ml	500 ml	1000 ml		500 ml	1000 ml
Verpackung		10 x 200 ml	12 x 500 ml	6 x 1000 ml		6 x 500 ml	6 x 1000 ml

KONTAKT

info@plum-deutschland.de
+49 4721 681801