

Bedienungsanleitung / Manual

ECOSTEP

- ▶ preiswert / reasonable
- ▶ leichter Transport / easy to carry
- ▶ einfache Bedienung / easy to handle

▶ Überschuh-Spender / Shoe cover dispenser

▶ ECOSTEP / 88818

Verpackungsangabe/Packaging Specification

Geräte-Abmessungen/Machine Measurements:

56 x 26 x 22 cm

Karton-Abmessungen/Machine Measurements:

56,5 x 26 x 22 cm

Nettogewicht/Carton Net Weight: 3 kg

Bruttogewicht/Carton Gross Weight: 4 kg

Lieferumfang/Packaging List

Überschuh-Spender/

Shoe cover dispenser: 1 piece

Benutzerhandbuch/User Manual: 1 piece



Platz für
Überschuhe **50**
Space for
overshoes

▶ ECOSTEP COMFORT / 88817

Verpackungsangabe/Packaging Specification

Geräte-Abmessungen/Machine Measurements:

65 x 25 x 96 cm

Karton-Abmessungen/Machine Measurements:

102,5 x 30 x 70 cm

Karton Nettogewicht/Carton Net Weight 5 kg

Karton Bruttogewicht / Carton Gross Weight: 8 kg

Lieferumfang/Packaging List

Überschuh-Spender/Shoe cover dispenser: 1 piece

Handgriff/Handgrip: 1 piece

Befestigungsschrauben/Mounting screws: 2 pieces

Benutzerhandbuch/User Manual: 1 piece



Platz für
Überschuhe **100**
Space for
overshoes

Ihr Überschuhautomat ist mechanisch; er funktioniert ohne Strom und Batterien.

SCHRITT 1: MIT ÜBERSCHUHEN BEFÜLLEN

1. Nehmen Sie ein Bündel Überschuhe und entfernen Sie die Verpackung. (Abb. 1)
2. Begradigen Sie den weißen Verbindungsstab, welches die Überschuhe verbindet. (Abb. 2)
3. Legen Sie das Bündel Überschuhe über den Einlass in den Überschuhautomaten. Stellen Sie sicher, dass das Bündel richtig platziert ist und setzen Sie die Schuhabdeckungsclips in den Überschuhautomaten entlang der Schlitze ein. (Abb. 3)
4. Entfernen Sie den weißen Verbindungsstab. (Abb. 4)
5. Ziehen Sie den ersten Überschuh aus der Öffnung heraus. (Abb. 5)

Ihr Überschuh-Automat ist nun einsatzbereit.

Your shoe cover dispenser is mechanical; it works without power and battery.

STEP 1: FILL WITH OVERSHOE

1. Take one bundle of shoe cover and remove its packing bag. (Fig. 1)
2. Straighten Clips Connecting Stick. (Fig. 2)
3. Put bundle of shoe cover into the shoe cover storage through shoe cover inlet. Make sure Bundle Bottom down and keep shoe cover clips entering into shoe cover storage along slots. (Fig. 3).
4. Take away Clips Connecting Stick. (Fig.4)
5. Pull out the first shoe cover close to shoe cover outlet. (Fig.5)

Your dispenser is ready for use.



SCHRITT 2: SO BENUTZEN SIE DEN ÜBERSCHUH-AUTOMATEN

Setzen Sie den Fuß mit der Ferse zuerst in den aufgespannten Überschuh und ziehen Sie Ihren Fuß nach hinten. Auf diese Weise wird der Überschuh automatisch aus dem Spender gezogen und angezogen. (Abb. 6, Abb. 7 and Abb. 8)

STEP 2: HOW TO USE THE OVER SHOE DISPENSER


Place foot with heel into shoe cover, and then pull it back until shoe cover comes out from shoe cover outlet to wrap your shoes automatically. (Fig. 6, Fig. 7 and Fig.8)

SCHRITT 1: MIT ÜBERSCHUHEN BEFÜLLEN

1. Stellen Sie sich auf die Rückseite des Überschuhautomaten und öffnen Sie den oberen Deckel. (Abb. 1)
2. Nehmen Sie ein Bündel Überschuhe und legen es in den Überschuhautomaten. Stellen Sie sicher, dass das Bündel richtig platziert ist und setzen Sie die Schuhabdeckungsclips in den Überschuhautomaten entlang der Schlitze ein. (Abb. 2, Abb. 3)
3. Entfernen Sie den weißen Verbindungsstab. (Abb. 4)
4. Heben Sie die Frontklappe und ziehen Sie den ersten Überschuh aus dem Auslass heraus. (Abb. 5, Abb. 6 and Abb. 7)
5. Schließen Sie die Frontklappe und den Deckel. Ihr Überschuhautomat ist nun einsatzbereit. (Abb. 8)

INSTALLATION ECOSTEP COMFORT

1. Stand at the back of shoe cover dispenser and open top lid. (Fig. 1)
2. Take one bundle of shoe cover and put it into the shoe cover storage. Make sure Bundle Bottom down and keep shoe cover clips entering into shoe cover storage along slots. (Fig.2 and Fig.3)
3. Take away Clip connecting stick. (Fig. 4)
4. Lift up front-gate and pull the first shoe cover close to shoe cover outlet. (Fig.5, Fig.6 and Fig.7)
5. Close Front-gate and Top Lid, now your dispenser is ready for use. (Fig.8)

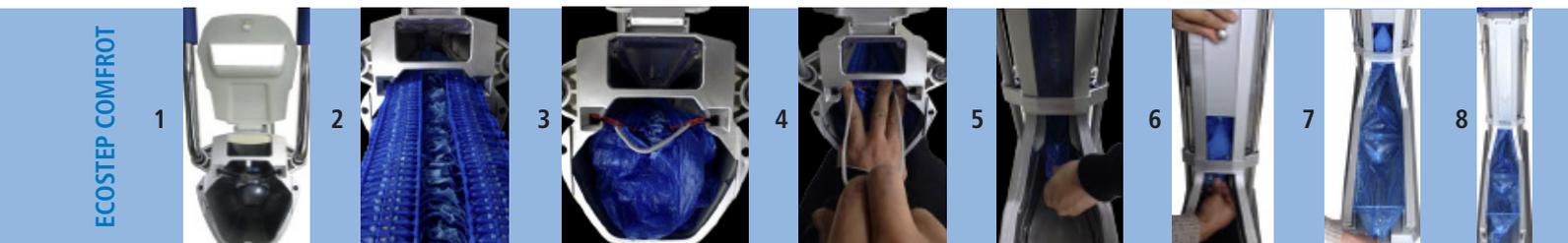

SCHRITT 2: SO BENUTZEN SIE DEN ÜBERSCHUH-AUTOMATEN

Setzen Sie den Fuß mit der Ferse in den aufgespannten Überschuh und ziehen Sie Ihren Fuß nach hinten. Auf diese Weise wird der Überschuh automatisch aus dem Spender gezogen und angezogen.

Wichtig: Für einen stabilen Stand halten Sie sich am Griff fest während

STEP 2: HOW TO USE THE OVER SHOE DISPENSER

Place foot with heel into shoe cover, and then pull it back until shoe cover comes out from shoe cover outlet to wrap your shoes automatically.

Caution: Please hold handle to stand firmly during operation.

TIPP FÜR ECOSTEP UND ECOSTEP COMFORT

Achten Sie während des Gebrauchs der Maschine darauf, dass Ihr Fuß beim Herausziehen stets horizontal steht.

TIP FOR ECOSTEP UND ECOSTEP COMFORT

Put the foot inside the shoe cover and pull the shoe cover backwards in horizontal direction.