

SCHADSTOFF-EINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLLÖSUNG	ANWENDUNG	FORTSETZUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG
FREMDKÖRPER z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	 Natriumchlorid- lösung (0,9%)	Augen so lange spülen bis die Fremdkörper herausge- waschen sind.	 Spülung mit Natriumchlorid- lösung (0,9%)
SÄURESCHÄDEN	 gepufferte Spüllösung BioPhos®74	Augen mit BIOPhos®74 ca. 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist.	 Spülung mit Natriumchlorid- lösung (0,9%)
ALKALISCHE SCHÄDEN ausgenommen kalzium- haltige Substanzen, z. B. Kalk und Zement	 gepufferte Spüllösung BioPhos®74	Augen mit BIOPhos®74 ca. 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist.	 Spülung mit Natriumchlorid- lösung (0,9%)
SONSTIGE SCHÄDEN z. B. Lösemittel und Öle, außer Substanzen, die Silber enthalten	 Natriumchlorid- lösung (0,9%)	Augen so lange spülen bis das unan- genehme Gefühl nicht mehr spürbar ist.	 Spülung mit Natriumchlorid- lösung (0,9%)
SCHÄDEN AUF DER HAUT durch Säuren, Alkali und Minerale	 gepufferte Spüllösung BioPhos®74	Haut mit BioPhos®74 ca. 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist.	 Spülung mit Natriumchlorid- lösung (0,9%)

Anwendung



Entnehmen Sie die Flasche aus der Augenspülstation, bzw. dem Augenspülkoffer.



Drehen Sie die Augenschale um 180° in Richtung des Pfeils bis die Versiegelung bricht.



Legen Sie den Kopf in den Nacken und spülen Sie das Auge gleichmäßig.



Beugen Sie sich vor dem Absetzen der Flasche nach vorn, um Ihre Kleidung vor Nässe zu schützen.



WICHTIG! Spülen Sie das Auge unabhängig von der Art der Verletzungen stets mit einem gleichmäßigen weichen Strahl und halten Sie es dabei weit geöffnet. Drücken Sie die Flasche beim Spülen leicht. Bei jeder Augenverletzung/ -verschmutzung ist unverzüglich ärztlicher Rat einzuholen! Setzen Sie die Spülung unbedingt mit Natriumchloridlösungen (0,9%) fort bis ein Arzt konsultiert wurde.

Augenspülung

„Soforthilfe für Ihre Augen“



1 Augenspülflasche

- sterile Augenspülflasche mit 0,9% Kochsalz-Lösung (Natriumchlorid)
- entspricht DIN 15 154-4
- zum Ausspülen von Fremdkörpern, wie Schmutz, Staub, Späne, Holz- und Metallsplitter**
- für den mobilen Einsatz oder als Nachfüllflasche in Augenspülstation
- 3 Jahre haltbar
- Spülzeit: 1 Flasche = ca. 5 Minuten

Art.-Nr.	Größe/Farbe	VE/Stück
50013	500 ml, transparent	1
50010	500 ml, transparent	6
50017	250 ml, transparent	10

2 Augenspülstation SINGLE

- Kunststoff-Halterung mit Anleitung
- weitere Eigenschaften siehe oben

Art.-Nr.	Größe/Farbe	VE/Stück
50011	1 x 500 ml, grün	1

3 Augenspülung BioPhos®74

- sterile Augenspülflasche mit phosphatpufferter Spüllösung (4,9%)
- zum Ausspülen bei Verätzungen der Augen durch Chemikalien, Säuren und Laugen, die als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe ins Auge gelangt sind**
- schneller und effektiver Schutz vor Schädigung des Auges
- erhält das zelluläre Elektrolytgleichgewicht durch die ausschließliche Verwendung natürlicher Substanzen
- besonders schonend, ph-neutral und ohne Konservierungsstoffe
- schnelle Neutralisation, da hohe Pufferkapazität
- manipulationssicherer Verschluss: kann nach Gebrauch nicht einfach mit Wasser aufgefüllt und wieder verschlossen werden – höchste Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
- entspricht DIN 15 154-4
- für den mobilen Einsatz oder als Nachfüllflasche in Augenspülstation
- 3 Jahre haltbar
- Spülzeit: 1 Flasche = ca. 2,5 Minuten
- für Labore, Gewerbebetriebe, Rettungsdienste, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Gefahrguttransporte, Militär und Polizei

Art.-Nr.	Größe/Farbe	VE/Stück
50014	250 ml, transparent	10

4 Augenspülstation Eye Care Medidrop I

- komplettes Set für Wandmontage
- inkl. 2 Augenspülflaschen (500 ml, Natriumchloridlösung, 0,9%)
- Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf
- inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung
- staubdicht und platzsparend
- integrierter Augennotfallplan

Art.-Nr.	Größe/Farbe	VE/Stück
50015	2 x 500 ml, grün	1

5 Augenspülstation DOUBLE


- Kunststoff-Halterung mit Anleitung
- weitere Eigenschaften siehe oben

Art.-Nr.	Größe/Farbe	VE/Stück
50012	2 x 500 ml, grün	1

6 Augenspülstation Eye Care Medidrop II

- komplettes Set für Wandmontage
- inkl. 2 Augenspülflaschen (1 x 500 ml, Natriumchloridlösung, 0,9% + 1 x 250 ml BioPhos®74)
- Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf
- inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung
- staubdicht und platzsparend
- integrierter Augennotfallplan

Art.-Nr.	Größe/Farbe	VE/Stück
50016	1 x 500 ml NaCl, transp. 1 x 250 ml BioPhos74, grün	1

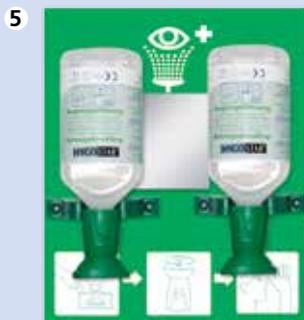

Sie möchten eine Augenspülung mit einer anderen Sprache als DE, NL, IT, GB und FR? Dann bestellen Sie mindestens 5 Augenspülstation oder 50 einzelne Flaschen. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot an. Vielen Dank!